

メンテナンスガイド

準備

- 洗浄の前に感染防護服とグローブを装着してください。
- カップリング・モーターからハンドピースを取り外してください。
- バーを取り外してください。

手作業での洗浄

- 流水下で、器具のボディ外側を洗浄してください。水温は38℃を超えないでください。飲料水品質以上の水を使用してください。
- 洗浄には専用ブラシを使用することをおすすめします。
- ウォッシャー・ディスインフェクターをお持ちでしたら、ウォッシャー・ディスインフェクターにハンドピースを入れる前に、取扱説明書を参照してください。
- ウォッシャー・ディスインフェクターの使用を推奨します。
- 超音波洗浄機は使用しないでください。

消毒

- 適切な除菌シートでハンドピースのボディを拭いてください。
- 浸漬洗浄は行わないでください。

オイルノズル

- BA アルティメット スプレーオイルに注油ノズルを接続してください。
- スプレー缶を勢い良く振ってください。

※BA アルティメット スプレーオイルをお使いください。

潤滑&内部洗浄

- スプレー缶をまっすぐ立てたまま、ハンドピース後方からノズルを差し込んでください。
- ハンドピースのヘッド部分をティッシュ等でカバーし、1-2秒スプレーしてください。ヘッドから吹き出したオイルが黒い場合、オイルが透明になるまで繰り返してください。
- 乾いたティッシュで表面の余分なオイルを拭きとってください。ふき取ったオイルに汚れが混ざる場合、オイルが綺麗になるまでスプレーを繰り返してください。
- チャック機能を維持するため、ヘッドのチャック孔からオイルをスプレーし、汚れを洗い流してください。

保管

- オートクレープの前にハンドピースを滅菌バッグに入れてください。

滅菌

- オートクレープの中にハンドピースを入れてください。
- 正しいサイクルを選んでください。
- 乾燥工程を含め、135℃を超える滅菌器を使用しないでください。

注意!

- **クイックカップリングは滅菌しないでください。**
- **滅菌サイクルが終わり次第、オートクレープからハンドピースを取り出し、放置しないでください。**

